


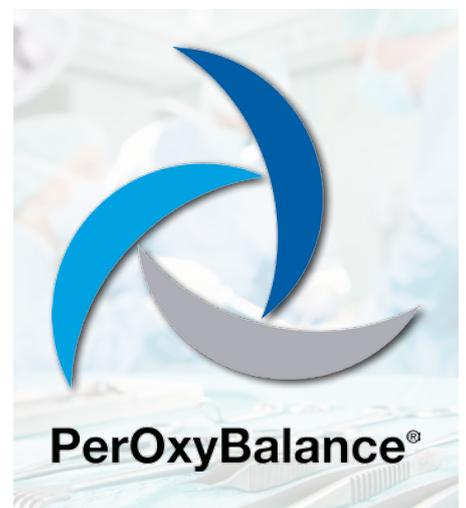

Sekusept® Pulver Classic

STARKE REINIGUNG. WIRKUNGS-
VOLLE DESINFEKTION.

- ▲ Leistungsstarke Rezeptur
- ▲ Breites Wirkspektrum
- ▲ Effektive Flächen- und Instrumentendesinfektion



Sekusept® Pulver Classic

STARKE REINIGUNG. WIRKUNGSVOLLE DESINFEKTION.

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
VAH-gelistet und zertifiziert	Standardisierte Absicherung für Anwender und Patienten
Breites Wirkspektrum gegen: Bakterien, Hefen, behüllte und unbehüllte Viren (inkl. Noroviren)	Höchste Leistung bei der Instrumenten- und Flächendesinfektion
Moderne und leistungsstarke Aktivwirkstoffe	Kurze Kontaktzeiten, niedrige Dosierungen. Wirtschaftliche Lösung für ein breites Anwenderspektrum.
Selbsttätige Reinigung	Eine starke Reinigungsleistung und die Wirkung von Aktivsauerstoff reduzieren den manuellen Reinigungsaufwand
Gute Materialvertäglichkeit	Anwendbar zur Aufbereitung vieler Materialien für maximalen Werterhalt Ihrer Instrumente. Geeignet zur Aufbereitung von Polycarbonat, Plexiglas (PMM A), Polysulfon und alle Edelmetallinstrumente. Zur Desinfektion aller abwaschbaren Oberflächen geeignet.
Geringes Staubverhalten, gute Löslichkeit	Anwenderfreundliche Formulierung. Auch geeignet zur Aufbereitung von Hohlinstrumenten mit engen Lumen.

Die hohe Effektivität von Sekusept® Pulver Classic in der Reinigung und Desinfektion garantiert ein Maximum an Sicherheit bei der Aufbereitung medizinischer Instrumente und der Flächendesinfektion.

EINSATZBEREICHE

Zur reinigenden Desinfektion von medizinischen Instrumenten aus Metall, Kunststoff, Elastomeren, Glas usw. Auch zur Desinfektion von Prothesen (Dental) verwendbar. Auch zur Flächendesinfektion geeignet. Anwendbar zur Desinfektion von Inkubatoren und Wannen für medizinische Bäder. Nicht geeignet für flexible Endoskope und Instrumente aus Aluminium oder mit vernickelten Oberflächen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Beim Ansetzen der Lösung, Pulver in Wasser einstreuen und mehrmals umrühren. Nach 15 Minuten ist die Lösung einsatzbereit. Instrumente sofort nach Gebrauch in die Sekusept® Pulver Classic Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten. Nach vorgeschriebener Einwirkzeit die Instrumente der Lösung entnehmen und mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität, besser sterilem aqua dest. abspülen. Die Lösung ist arbeitsfähig zu wechseln.

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Bitte beachten Sie die Angaben der Instrumentenhersteller. Nur für den professionellen Gebrauch.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumpercarbonat, Phosphat, nicht-ionische Tenside.

Der Wirkstoff Peressigsäure entsteht in der Anwendungslösung. Eine 2% ige Lösung enthält >600 mg/L (ppm) Peressigsäure.

Sekusept® Pulver Classic

KLASSISCHE WERTE: KRAFTVOLL – SICHER – EFFEKTIV

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT
VAH-Liste	%	g/L	Min.
Instrumentendesinfektion gemäß VAH **	2	20	60
mit geringer und hoher Belastung	4	40	15
Flächendesinfektion gemäß VAH **	1,5	15	60
mit geringer Belastung	0,5	5	240
Flächendesinfektion gemäß VAH **	1	10	240
mit hoher Belastung	1,5	15	60
IHO-Viruzidie-Liste	%	g/L	Min.
Begrenzt viruzid * (inkl. HIV, HBV, HCV)	2	20	15
Rotaviren	1	10	60
Adenoviren	2	20	15
Papovaviren	2	20	5
Viruzid * (inkl. Noroviren)	2	20	120

1 Dosierlöffel = 20 g = 25 ml Pulver / 1 Dosierbecher = 160 g = 200 ml Pulver
* gem. RKI Leitlinie Stand 08/2008 ** DGHM Testmethode Stand 2001

Eine wirkungsvolle Desinfektion setzt eine effektive Reinigung voraus. Nur eine maximale Entfernung von organischen Verschmutzungen garantiert einen wirksamen Desinfektions- und Sterilisationsprozess.

Sekusept® Pulver Classic ist seit Jahrzehnten für eine starke Reinigungsleistung bekannt.

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Sekusept® Pulver Classic 30 494 60
Eimer mit Messlöffel 4 x 2 kg

Sekusept® Pulver Classic 30 495 30
Eimer mit Messbecher 10 kg

Worldwide Headquarters

370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

www.ecolab.com

Regional Office

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1

40789 Monheim am Rhein

Phone +49 (0) 2173-599-0

www.ecolabhealthcare.de