



Sekumatic® FNZ

FLÜSSIGES NEUTRALISATIONSMITTEL, ZITRONENSÄUREBASIS

- ▲ Wirtschaftliche Dosierung
- ▲ Effektive Neutralisation
- ▲ Universell verwendbar



Sekumatic® FNZ

NEUTRALISATIONSMITTEL ZUR MASCHINELLEN INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Formulierung auf Basis von Zitronensäure	Sichere Neutralisation nach alkalischer Reinigung. Verhindert Kalk und säurelösliche Anschmutzungen.
Effiziente Rezeptur	Hohe Wirksamkeit bei niedriger Dosierung
Optimal abgestimmte Rezepturkomponenten	Breites Anwenderspektrum für säurebeständige Materialien aus dem medizinischen Bereich

Chemisch-physikalische Daten		
Dichte	20 °C	1,16 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 2,3
pH-Wert* (Lösung, 1-3 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	2,8 - 3,2
Leitfähigkeit (Lösung, 1-3 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	2,2 - 4,6 mS/cm

* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.



Neutralisationsmittel für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte



EINSATZBEREICHE

Zur Neutralisation nach alkalischer Reinigung von chirurgischen Instrumenten, MIC, starren Endoskopen, Kunststoff-Utensilien und Elastomere (z. B. Gummi) aus Anästhesie, Chirurgie, Urologie, OP-Schuhe, Babyflaschen und Laborglas in Krankenhaus und anderen medizinischen Einrichtungen.

ANWENDUNGSHINWEISE

In Reinigungs- und Desinfektionsgeräten im medizinischen Bereich, 1-3 ml/L. Einsetzbar bei allen Wasserhärten.

Die Sekumatic® FNZ-Lösung muss nach der Einwirkung vollständig abgespült werden, hierzu ist vorzugsweise vollentsalztes Wasser (VE) zu verwenden.

Bitte beachten Sie die Angaben der Instrumentenhersteller. Nur für den professionellen Gebrauch.

ZUSAMMENSETZUNG

Wässrige Zitronensäurelösung

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Sekumatic® FNZ	30 235 10
Kanister	3 x 5 L
Sekumatic® FNZ	30 235 00
Kanister	20 L
Sekumatic® FNZ	30 265 50
Fass	200 L

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Regional Office
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0) 2173-599-0
www.ecolabhealthcare.de

