

mobilomed msept Quicksept A

Alkoholische Schnelldesinfektion



- aldehydfrei (Allergiker geeignet)
- duft- und farbstofffrei
- sehr schnelle Einwirkzeit

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion

ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Ethanolbasis zur wirksamen und schnellen Desinfektion von nicht-invasiven medizinischen Geräten und alkoholresistenten Oberflächen aller Art. Umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und alle Viren (viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren).

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

ANWENDUNG

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit, jedoch mindestens 30 Sekunden, feucht halten.

EINWIRKZEITEN UND KONZENTRATIONEN

(Gebrauchsfertige Lösung! Nicht verdünnen!)

Bakterizid und levurozid (inkl. MRSA, VRE, Cand.albicans)	30 sek
Mykobakterien (M.Avium, M.Terrae)	30 sek
Viren (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota, Noro)	15 sek
Adenoviren	30 sek
Polioviren	2 min
Schimmelpilze	2 min

Prüfungen: EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: Ethanol 57g, Isopropanol 6g

baua- Nr: N-100110

UFI Code: QDKK-PJQC-M00H-W790

LIEFERFORMEN

Größe	Artikelnummer
500ml	285693
1 Liter	285696
5 Liter	285697

Hersteller

mobiloclean Handelsgruppe GmbH & Co.KG
Lilienthalallee 5
80807 München

KENNZEICHNUNG GEMÄß GEFAHRSTOFFVERORDNUNG

Gefahr Verursacht schwere Augenreizung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung

DATEN ZUR UMWELT

Alle Behältnisse und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE).

Die Behältnisse und Verschlüsse sind entsprechend gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung und eine optimale Wiederverwertbarkeit zu ermöglichen.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen**

Stand der Information 05/2021